



## Bloco de Rotação Bi-triangular

### Guia de utilização

O bloco de rotação bi-triangular é o modo mais fácil e mais eficiente para girar dentes. Este tipo de rotação normalmente não requer a remoção do fio para colocação, pois é usado com o amarrilho. A dupla formada pelo rotation e o pelo fio produz rapidamente a ação desejada.

### Instruções



1. Para aumentar a eficiência, uma dobra anti-rotacional exagerada é posicionada mesial e distalmente para o dente.



2. Coloque o bloco de rotação debaixo do fio e torça o fio com a pinça Mathieu. Use um sputnik para pressionar o fio dentro do slot prevenindo o excesso de tração no braquete.



3. Uniformemente, torça pelo menos quatro vezes o fio utilizando a pinça Mathieu. Comprima o restante do fio debaixo do arco, prevenindo assim a irritação labial.



4. O bloco de rotação está comprimido contra o dente enquanto o arco é totalmente amarrado no slot - uma dupla ideal para rotacionar o dente rapidamente e eficientemente.