



No-Etch

Guia de utilização

Instruções de uso:

1. Faça a profilaxia da superfície do esmalte onde será feita a colagem. Use uma pasta que não contenha óleo ou flúor.
 2. Enxágüe completamente e seque o dente.
 3. Isole os dentes com rolos de algodão para manter seca a área de colagem e retraindo os lábios, língua e bochechas para prevenir o contato dos produtos com os tecidos moles.
 4. Coloque uma gota do Primer e uma gota do Bond em um casulo misturador.
 5. Usando um pincel, misture os dois líquidos por 3 segundos.
 6. Com o pincel, aplique a mistura na superfície dentária onde será realizada a colagem. Esfregue suavemente por 5 segundos.
 7. Seque a superfície molhada e polida por 5 segundos com um suave jato de ar.
 8. Aplique uma quantidade pequena de adesivo na malha do braquete.
 9. Posicione o braquete e pressione-o firmemente contra o dente.
 10. Remova o excesso de adesivo que aparecerá envolta da base do braquete.
 11. Em braquetes de aço, fotopolimerize por 30 segundos (lâmpada halôgena) ou 15 segundos (LED), na superfície oclusal. Em braquetes cerâmicos, fotopolimerize por 10 segundos (lâmpada halôgena) ou 5 segundos (LED), na superfície labial.
 12. Você pode colocar o fio imediatamente após a fotopolimerização.
 13. As intensidades dos fotopolimerizadores variam muito. Alguns aparelhos com maior ou menor potência irão requerer um tempo menor ou maior de fotopolimerização. Em geral, a superfície labial necessita de um tempo de fotopolimerização menor do que a lingual e incisal.
 14. O Primer, o Bond e o Adesivo depois de retirados de suas embalagens não podem ser expostos diretamente a luz da cadeira ou do consultório por um período extenso. Isto pode provocar a polimerização do material uma vez que estas luzes podem ser suficientemente fortes para isso.
- Remoção: Para remover o braquete use uma pistola para remoção de braquetes ou um alicate apropriado.
15. Qualquer adesivo remanescente no esmalte pode ser removido com um instrumental. Uma broca não deve ser necessária.
 16. Com uma gota de primer e uma gota de bond você cola até 10 braquetes

Importante

- O material deve ser conservado em lugar fresco ou dentro da geladeira. Neste último caso, retirar da geladeira e deixar em temperatura ambiente durante 30 minutos antes de usar.
- Não coloque nenhum dos produtos em contato com os tecidos moles.