




Manual Powgard Extreme Como Moldar


Cuidados básicos

- Todo o procedimento não deve levar mais do que 3 minutos e é melhor realizado em frente a um espelho. Faça um teste a “seco” antes.
- Tenha em mãos água recém fervida, um recipiente, colher, espelho e um relógio (que mostre os segundos).
- O Powgard Extreme deve ser completamente aquecido para o que o procedimento tenha sucesso.

Instruções

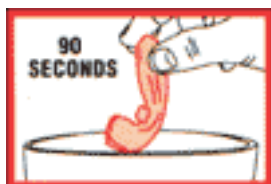

Ponha o Extreme (com o posicionador lingual para baixo) em um recipiente com água recém fervida (100°C) por 90 segundos.

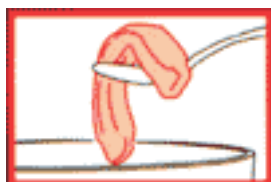

Retire o Extreme cuidadosamente usando uma colher.



Resfrie em água corrente por somente um segundo trazendo a temperatura da superfície para um nível confortável. Passe rapidamente para o próximo passo.



Olhando no espelho, alinhe o centro do Extreme com a linha média dos dentes superiores e rapidamente execute os passos seguintes.



Imediatamente adapte o Extreme aos dentes superiores (posicionador lingual para cima) e pressione firmemente primeiro contra os molares e depois contra os dentes da frente.



Traga a mandíbula para frente e para cima na base do Extreme em alinhamento com os dentes superiores.



Ponha a ponta da língua no posicionador lingual e feche a boca enquanto morde firmemente o Extreme. Sugue com força e pressione as bordas de Extreme contra os dentes e a gengiva através dos lábios e bochechas (continue por 20 segundos).

Remova da boca e resfrie com água corrente por 30 segundos. Recoloque na boca e teste se está firme e confortável.

Dicas

- Repita os passos de 1 a 7 se a modelagem não está segura (reaqueça a água para 100°C).
- Se a adaptação se tornar insatisfatória ou desconfortável pelo movimento dos dentes após um período de tempo, repita o procedimento acima. O Extreme pode ser remodelado regularmente se o ajuste for necessário.
- A retenção aumenta com um pequeno encolhimento após 24 horas.
- Se a mordida é mais larga ou estreita que o normal, ajuste o Extreme pressionando as pontas uma contra a outra ou separando-as para que o aparelho encaixe no arco na modelagem. Faça isso com o aparelho “quente”.
- O Extreme pode não se adaptar no caso de dentes muito desalinhados.



<http://www.OrthoSource.com.br>

<http://www.Trainer.com.br>