



Manual Powrgard for Braces - arco único (P4B-S) Como Moldar

Cuidados básicos

- Tenha em mãos água recém fervida, um recipiente, colher, espelho e um relógio (que mostre os segundos).
- O P4B-S deve ser completamente aquecido para o que o procedimento tenha sucesso.
- Deve-se tomar cuidado para não aquecer demais o P4B-S pois isto pode causar distorção permanente da forma.
- Nunca coloque o P4B-S diretamente em água fervendo no fogão ou microondas. Use somente água recém fervida (100°C).

Instruções



Coloque água recém fervida em uma tigela ou xícara. Imediatamente, coloque o P4B-S na água (100°C) durante 20-30 segundos.



Remova da água com uma colher e coloque-o na boca (suporte lingual para cima), posicionando-o sobre o aparelho ortodôntico superior. Cuide para que a marca da linha do centro do P4B-S corresponda à linha média dental.



Traga a mandíbula para frente e para cima até a base do P4B-S e oclua os dentes suavemente.



Modele as extremidades superiores ao redor dos dentes posteriores pressionando a bochecha firmemente com os dedos.



Coloque a ponta da língua contra o suporte lingual e sugue fortemente. Continue mantendo esta posição de modelagem por mais 20 segundos.



Remova o P4B-D da boca e coloque-o em água fria durante 10 segundos. Remova o gabarito e recolque o P4B-D na boca do paciente para conferir o ajuste (mantendo o gabarito em um lugar seguro para um uso futuro).



Recoloque o P4B-S na boca e confira se o ajuste está bom e confortável.

Este procedimento inteiro não deverá levar mais que 2 minutos.

Dicas

- Repita os passos de 1 a 7 se a modelagem não está segura (reaqueça a água para 100°C).
- Se a adaptação se tornar insatisfatória ou desconfortável pelo movimento dos dentes após um período de tempo, repita o procedimento acima. O P4B-S pode ser remodelado regularmente se o ajuste for necessário.
- A retenção aumenta com um pequeno encolhimento após 24 horas.
- Se a mordida é mais larga ou estreita que o normal, ajuste o P4B-S pressionando as pontas uma contra a outra ou separando-as para que o aparelho encaixe no arco na modelagem. Faça isso com o aparelho “quente”.
- Sempre remova da boca cuidadosamente para não deslocar os braquetes.

ORTHO SOURCE
DO BRASIL

<http://www.OrthoSource.com.br>

<http://www.Trainer.com.br>